

# EASY JECT

## BOVINE FLUID THERAPY SET




# ست سرم

مخصوص استفاده در دامهای بزرگ

[www.ZOOPHACO.com](http://www.ZOOPHACO.com)  
ZOOPHA PARNIAN PARS

# ست سرم


## مخصوص استفاده در دامهای بزرگ

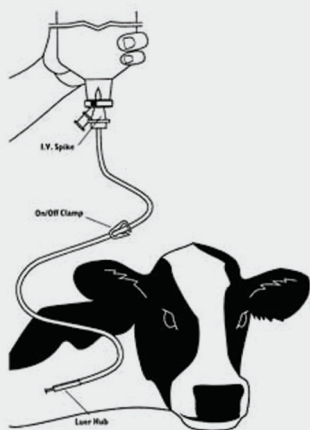

در بیماری‌های شدید حیوان بزرگی چون گاو نیازمند دریافت حجم بالایی از مایعات داخل رگی در مدت زمان کوتاهی می‌باشد که ست‌های مایع‌درمانی موجود این امکان را برای یک گاو حدود ۵۰۰ kg فراهم نمی‌کنند.

این حجم می‌تواند ۲ تا ۳ لیتر محلول هایپر تونیک یا ۵۰ لیتر ایزوتونیک باشد. طبق آخرین مقالات تزریق سرم‌های هایپر تونیک باید در مدت زمان ۳ الی ۴ دقیقه صورت پذیرد. ست‌های شرکت زوفا این امکان را فراهم می‌کند که ۲ سرم همزمان و بالغ بر ۳۰ لیتر در ساعت مایعات را در اختیار حیوان قرار دهند.

قطر لوله‌های این ست ۲ برابر ست‌های انسانی می‌باشد و انتقال مایعات را تا ۱۶ برابر این ست‌ها انجام می‌دهد. این حجم در کولیک‌های شدید گوساله، زمین‌گیری گاو، کم‌آبی و موارد اورژانس دیگر شدیداً مورد نیاز می‌باشد.

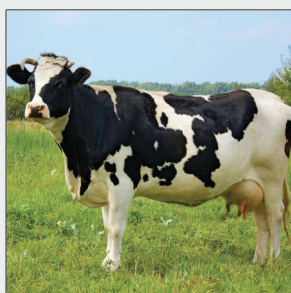

## توصیه‌های ضروری در استفاده از ست سرم

۱. این ست برای تزریق وریدی سرم‌های هایپر تونیک و حجم‌های بالای سرم‌های ایزوتونیک در نظر گرفته شده است. (داروهایی مانند کلسیم بایستی با احتیاط مصرف شود).
۲. برای سهولت استفاده طول لوله نسبت به نمونه‌های انسانی بلندتر شده است.
۳. ترجیحاً برای افزایش سرعت عبور سرم از سرسوزن شماره ۱۴ و در صورت عدم امکان از شماره ۱۶ استفاده شود.

۴. برای افزایش سرعت عبور سرم، نصب سرم در ارتفاع مناسب الزامیست. (با افزایش ارتفاع سرم، سرعت عبور بیشتر می‌شود).
۵. با تغییراتی که در ست سرم ایجاد شده است، سرعت عبور سرم نسبت به نمونه‌های معمولی ۲ تا ۳ برابر شده است.

۶. با تعبیه دو لوله سرم نامساوی امکان تزریق همزمان ۲ سرم در یک سطح فراهم شده است. (استفاده از Hanger زوفا امکان آویختن چند سرم به صورت هم سطح را در ارتفاع دلخواه فراهم می‌کند).

۷. در صورت احتمال رسوب و یا شلاته شدن از ست سرم‌های فیلتردار استفاده گردد، ولی در صورت اطمینان از عدم وجود ذرات، از ست سرم بدون فیلتر استفاده گردد.
۸. در هنگام تزریق همزمان ۲ سرم توجه شود که هر ۲ سرم در ارتفاع یکسان قرار بگیرند تا محتویات سرم بالاتر وارد سرم پایین‌تر نشود.



## شرکت زوفا پرنیان پارس

تهران، خیابان شریعتی، ابتدای خیابان ظفر، پلاک ۳۴، ساختمان پزشکان ۲۶، واحد ۶  
تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۰۸۶۵۱ و ۰۲۱-۲۲۲۷۸۲۵۱ | فکس: ۰۲۱-۲۲۲۵۳۵۰۰